

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Байрамаульская СОШ»**



Шихмурзаев Б.Ш.

Инструкция по обработке бактерицидных ламп

Обработка бактерицидных ламп проводится в каждую генеральную уборку в соответствии с графиком и по мере загрязнения*.

Порядок обработки:

Проверить отключение установок от электросетей.

Провести очищение от пыли колб бактерицидных ламп, а также используемых экранов. Колбы ламп протирают безворсовой тканью без воды (моющих и дезинфицирующих средств)**.

Обработать используемые экраны бактерицидных ламп:

№ п/п	Наименование этапа обработки	Описание этапа обработки экранов
1	Обработка экранов раствором моющего средства***	Поверхность экрана протереть ветошью, смоченной 0,5% раствором моющего жидкого универсального средства «Прогресс» (50 мл моющего средства на 10 л воды). Ветошь должна быть хорошо отжата для предотвращения попадания моющего средств на колбы ламп
2	Дезинфекция экранов	Поверхность экрана протереть ветошью, смоченной 0,015% раствором дезинфицирующего средства «Хлормисепт-Р» (1 таблетка на 10 л воды), время обработки 60 минут
3	Ополаскивание экранов	По окончании дезинфекции экран протереть ветошью, смоченной в воде, до устранения следов и запаха дезинфицирующего средства

№ п/п	Наименование этапа обработки	Описание этапа обработки экранов
4	Ополаскивание и сушка ветоши	По окончании дезинфекции ветошь прополаскивают под проточной водой и сушат
5	Хранение ветоши	Хранят обработанную и просушенную ветошь в емкости «Ветошь чистая»

* Дезинфицирующие лампы и элементы облучателей необходимо содержать в идеальной чистоте, поскольку даже незначительный слой пыли становится препятствием на пути потока излучения.

** Колбы бактерицидных ламп импульсного типа не нуждаются в дополнительной обработке салфетками в процессе их использования по назначению.

*** Этапы обработки в моющем средстве и дезинфекцию возможно совмещать путем добавления к рабочим растворам моющего средства в количестве 50 мл на 10 л.